

EVAC+CHAIR®
Emergency Evacuation For Everyone

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EVAC+CHAIR 500H



CE UK CA TÜVNORD FIA ROSPA



**MADE IN
BRITAIN®**

WAŻNE INFORMACJE

1. Twoje krzesło Evac+Chair powinno być obsługiwane przez przeszkolony personel.
2. Szkolenie personelu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi firmy Evac+Chair, jak podano w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Kursy dla operatorów i kluczowych trenerów powinny odbywać się co 3 lata, aby zapewnić dostęp do bieżących informacji w zakresie korzystania z krzesła Evac+Chair 500H.
4. Upewnij się, że dokumentacja szkoleniowa jest dostępna i aktualna (patrz dokumentacja szkoleniowa na stronie 4).
5. Zaleca się prowadzenie kwartalnych ćwiczeń z krzesłem Evac+Chair 500H, aby upewnić się, że personel jest przeszkolony i kompetentny.
6. Zaleca się kwartalną kontrolę krzesła Evac+Chair 500H, aby upewnić się, że nie uległo uszkodzeniu. Więcej informacji znajduje się na stronie 22.
7. W przypadku transportu pasażerów o większej wadze zalecamy obsługę krzesła dwiema osobami.
8. Aby zapewnić optymalne działanie systemu Evac+Chair, pasy powinny być obracane co 3 miesiące.

GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA FIRMA

Evac+Chair ma pięć lat gwarancji na wadliwe materiały i wykonanie. Nie obejmuje to części podlegających zużyciu, takich jak pasy "V", ani uszkodzeń spowodowanych nadużyciem i/lub wszelkich innych uszkodzeń, które powstały w wyniku naruszenia wytycznych zawartych w podręczniku użytkownika lub instrukcji szkoleniowej. Obejmuje to również obsługę Evac+Chair przez zewnętrzną firmę. Pasy "V" zaleca się wymieniać co 2 lata w oparciu o przeciętne użytkowanie i praktykę.

Producent, ani jego dystrybutorzy nie uznają napraw przeprowadzonych przez osoby trzecie ani też nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody majątkowe lub osobowe, przypadkowe lub wtórne.

SPIS TREŚCI

4-5

Szkolenie i dokumentacja dotycząca konserwacji

6-8

Informacje ogólne

9-10

Przygotowanie krzesła

11-12

Przenoszenie

13-16

Zjazd

17-18

Funkcje specjalne

19-20

Szkolenie i konserwacja

21

Montaż uchwytych ściennych

22

Kontrola wizualna

23

Akcesoria


24

Międzynarodowa instrukcja obsługi



Międzynarodowa instrukcja obsługi:


evacchair.co.uk/user-guides

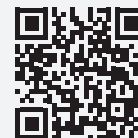


THE EVAC+CHAIR 500H



Przeznaczenie: Urządzenie Evac+Chair 500H są zaprojektowane wyłącznie do ewakuacji i transportu awaryjnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnym opiekunem klienta lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Evac+Chair w celu uzyskania dodatkowych informacji.

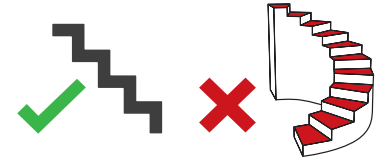BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE**TYLKO W PRZYPADKU ZJAZDU****NIE NADAJE SIĘ DO SCHODÓW SPIRALNYCH****KONSERWACJA
(ZDECYDOWANIE ZALECANE)****SZKOLENIE
(ZDECYDOWANIE ZALECANE)****GWARANCJA
PRODUCENTA****DORADZTWO W
ZAKRESIE OBSŁUGI**

*W przypadku cięższych pasażerów zaleca się obsługę dwuosobową.

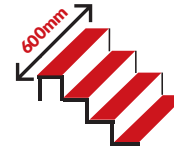KĄT NACHYLENIA SCHODÓW**MINIMALNA DOPUSZCZALNA
SZEROKOŚĆ SCHODÓW**

*Do ewakuacji w górę, schodów kręconych i wąskich dostępne są inne krzesła Evac+Chair.

CO ZAWIERA OPAKOWANIE?

KRZESŁO




INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



POKROWIEC PRZECIWPYŁOWY



UCHWYTY ŚCIENNE


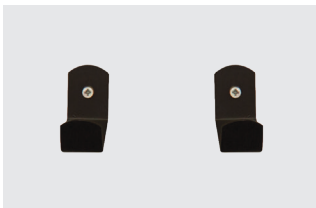





ZNAK FOTO ILUMINACYJNY






PASEK PRZEDŁUŻAJĄCY





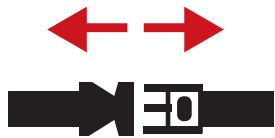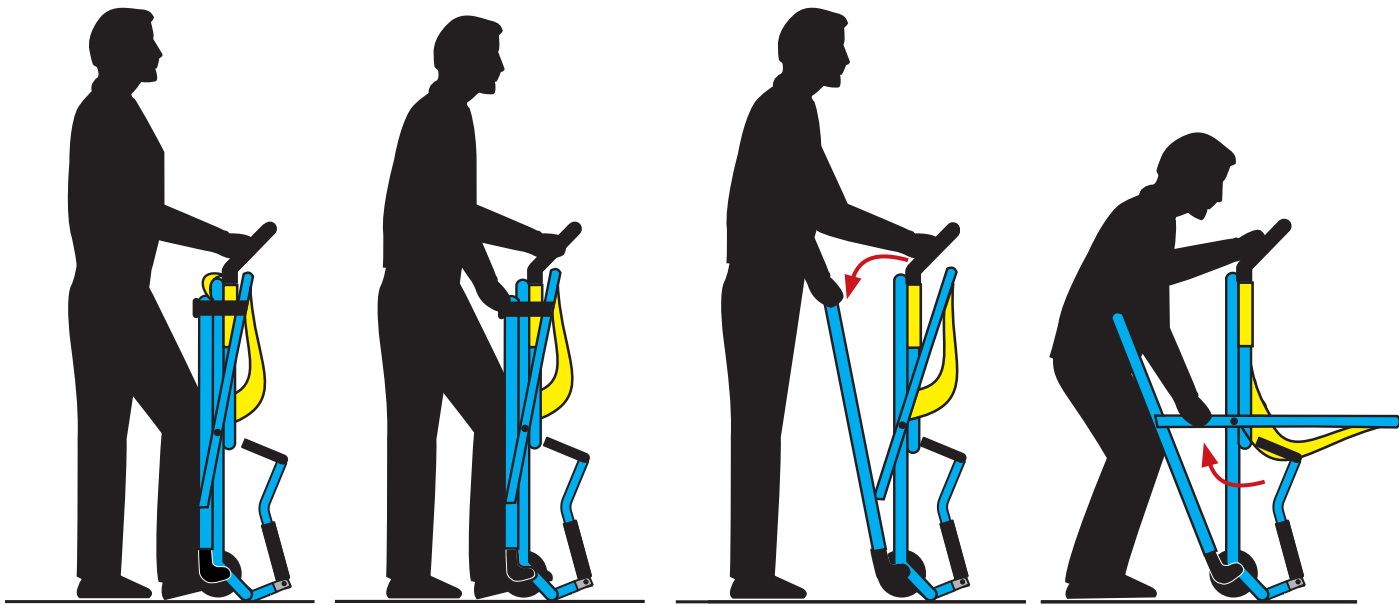


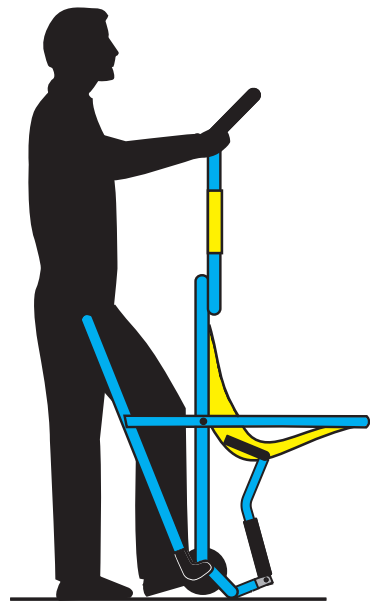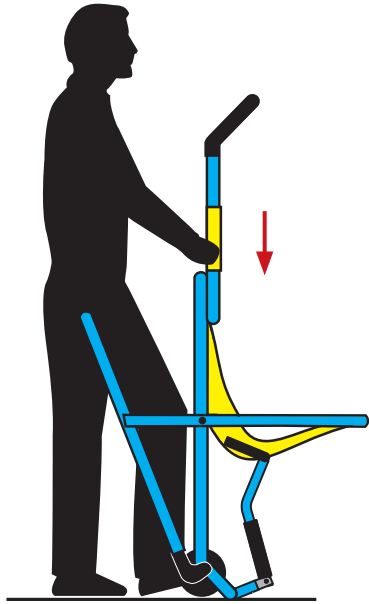
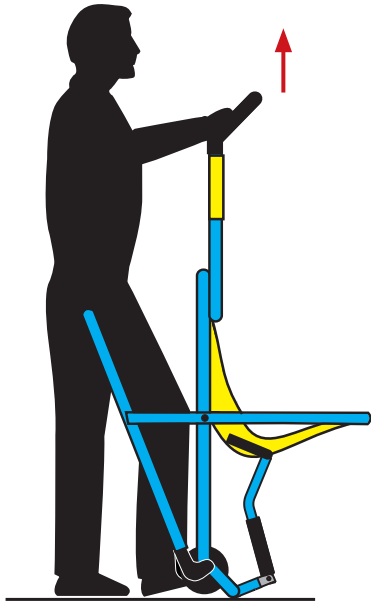


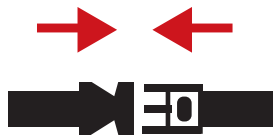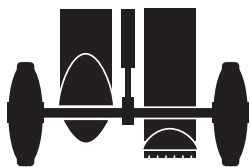
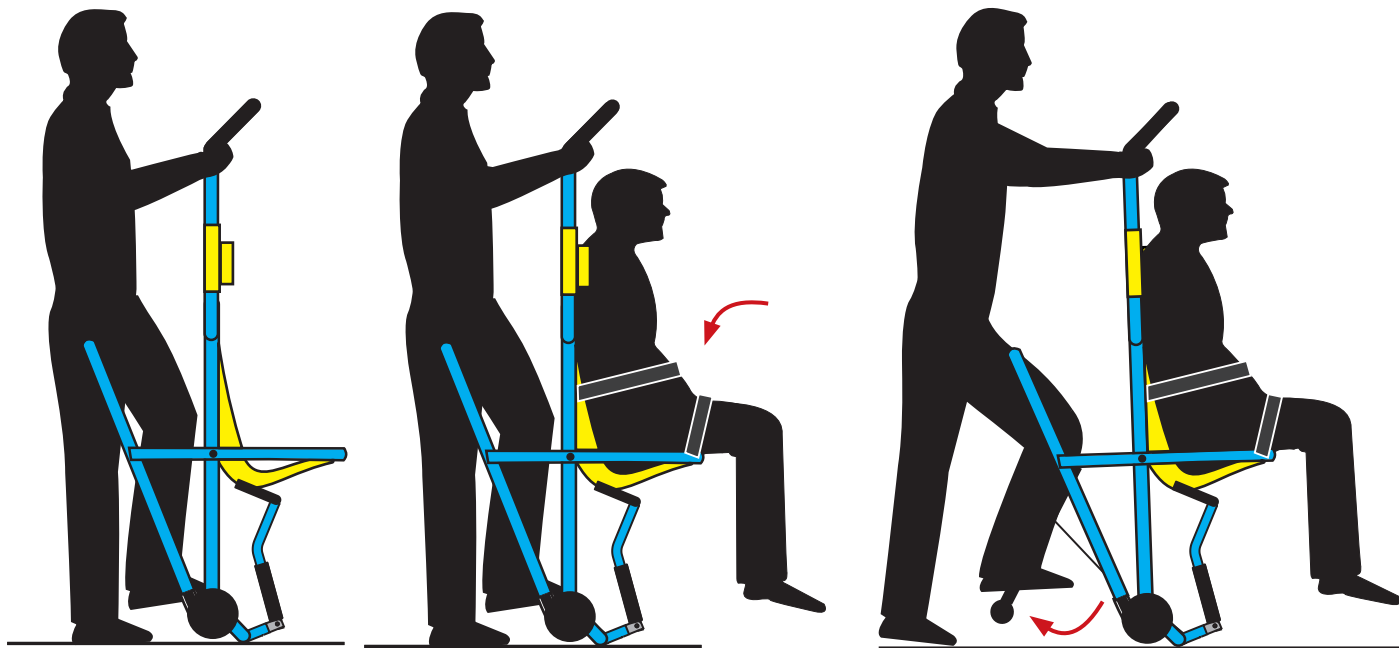



X2

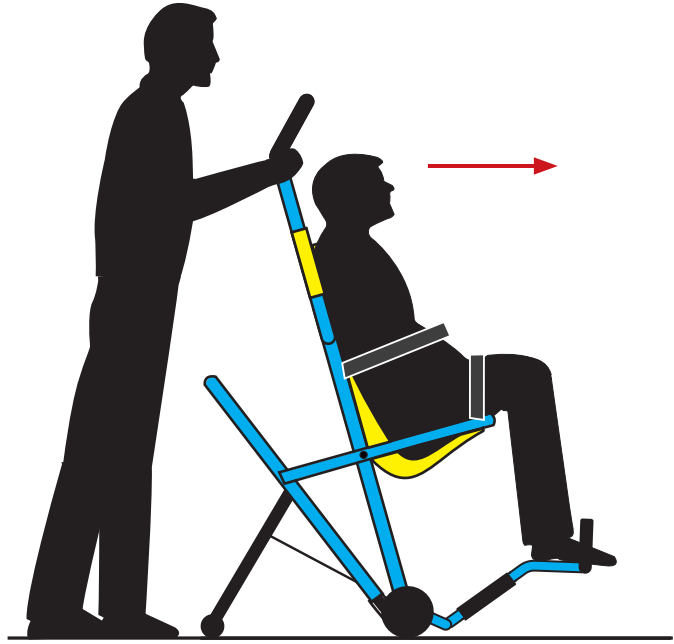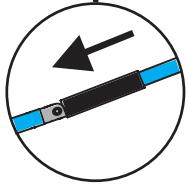

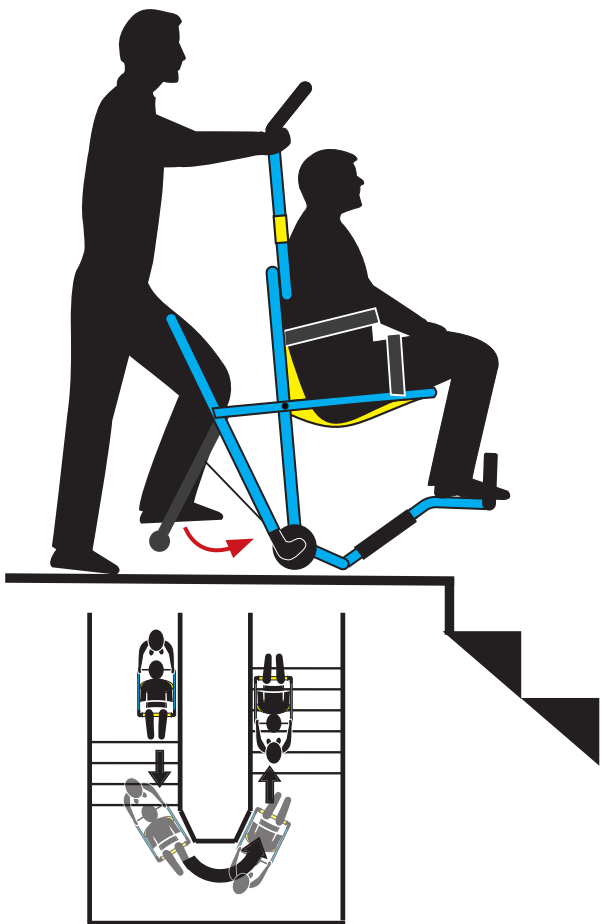

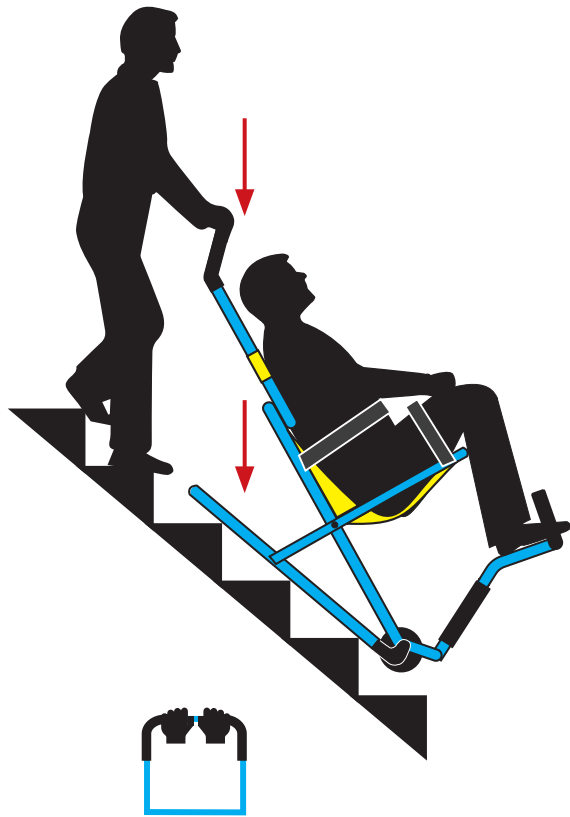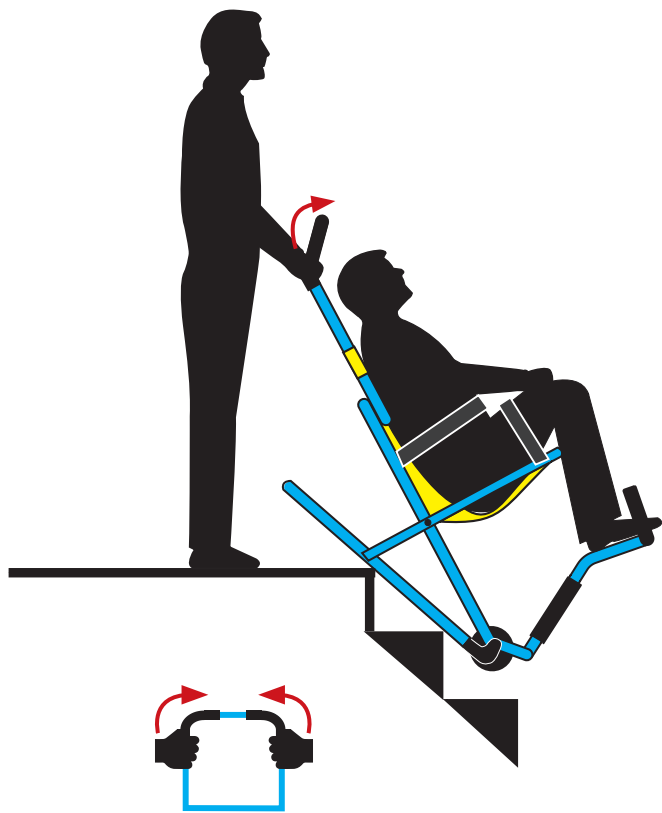

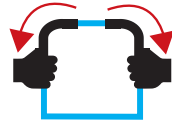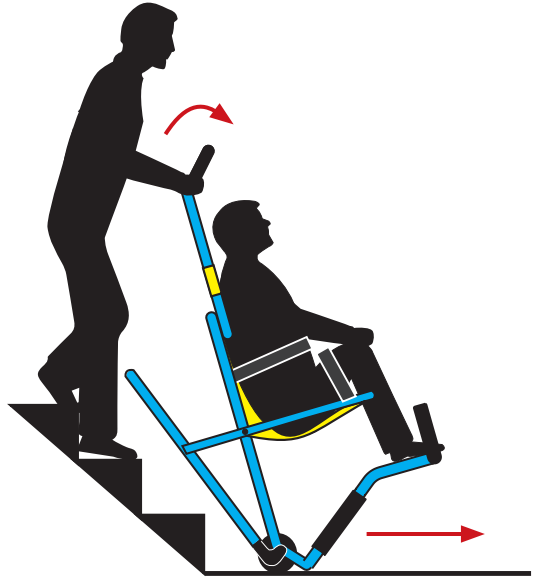


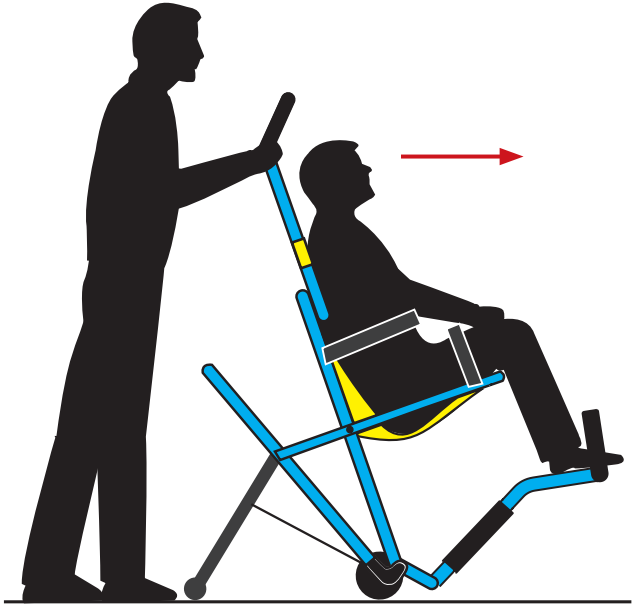

HAMULCE







Odblokowane

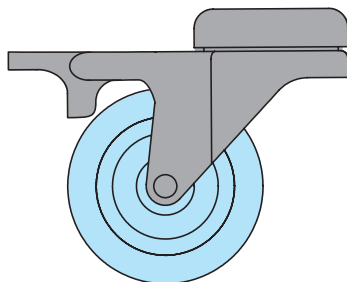


Zablokowane



ZAGŁÓWEK

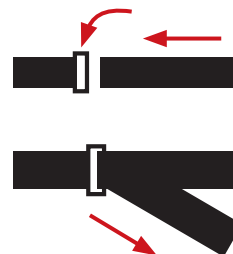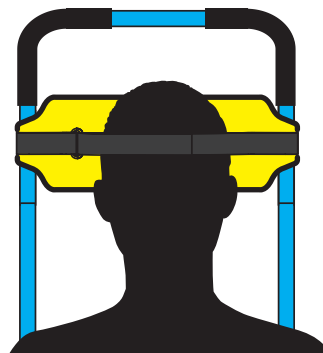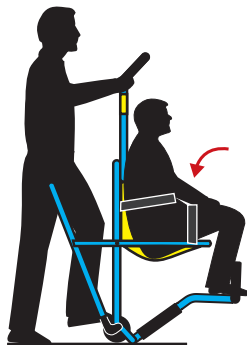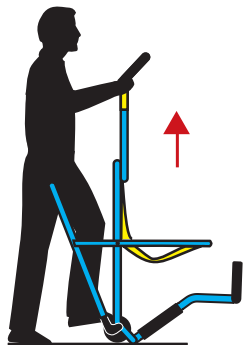

UCHWYT STERUJĄCY

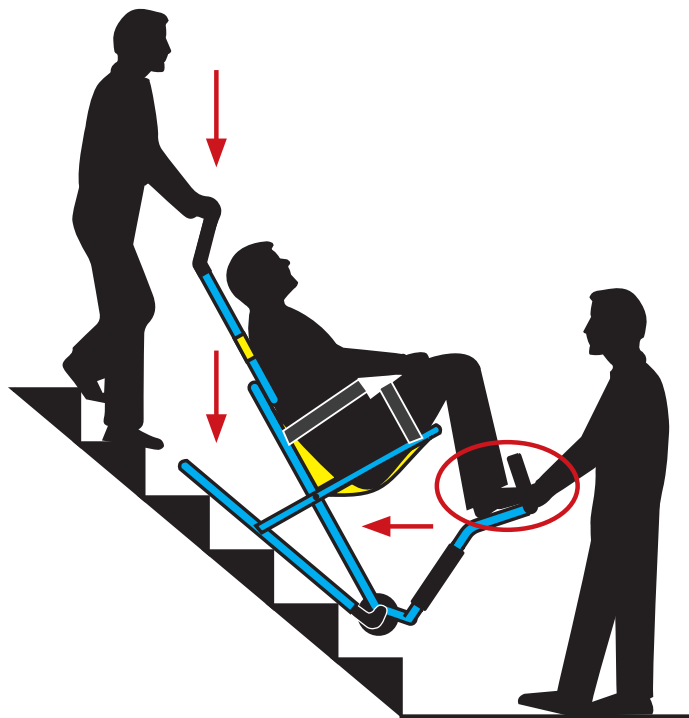


PASEK PRZEDŁUŻAJĄCY



Aby użyć uchwytu sterującego znajdującego się z przodu systemu Evac+Chair, należy wcisnąć go w schody, aby zwiększyć prędkość zjazdu.

SZKOLENIE

CZY TWÓJ PERSONEL JEST PRZESZKOLONY?

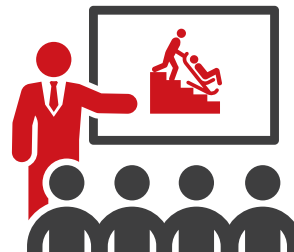

POWODY, DLA KTÓRYCH NALEŻY SIĘ SZKOLIĆ:

- 1** Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obsługi i pasażera.
- 2** Odnowienie trzyletniego certyfikatu na użytkowanie krzesła.
- 3** Przeszkolony personel oznacza zwiększenie bezpieczeństwa na obiekcie.
- 4** Zmniejszenie ilości wypadków spowodowanych niewłaściwą obsługą.
- 5** Upewnij się, że stosujesz się do wytycznych ewakuacji.

Szkolenie dla personelu obsługującego

2,5-godzinne szkolenie mające na celu przygotowanie obsługi do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z krzesła Evac+Chair. Nasze szkolenie umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia w obsłudze i wybieraniu lokalizacji krzesła Evac+Chair oraz zapewnia dostęp do bieżącej wiedzy z zakresu ewakuacji osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Kurs dla personelu szkolącego

4-godzinny kurs szkoleniowy mający na celu dokładne przeszkolenie z zakresu bezpiecznej i prawidłowej obsługi krzesła Evac+Chair, a także zapewnienie praktycznych i teoretycznych umiejętności szkolenia i certyfikacji innych osób. Ten kurs jest przeznaczony dla organizacji z dużą liczbą osób, które wymagają elastyczności, aby szkolić rotujący personel.

Nasze szkolenia są odpowiednie dla 2-4 kandydatów. Po pomyślnym ukończeniu każdy kandydat otrzyma certyfikat ważny trzy lata.

W celu omówienia wymagań szkoleniowych, prosimy o kontakt telefoniczny
515 82 33 22

SERWIS I KONSERWACJA



UMOWA SERWISOWA I KONSERWACYJNA



Jako wyrób medyczny klasy I, urządzenie Evac+Chair powinno być regularnie serwisowane i konserwowane, aby zapewnić jego bezpieczne działanie. Wymóg ten jest zawarty w karcie gwarancyjnej produktu.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH

Back

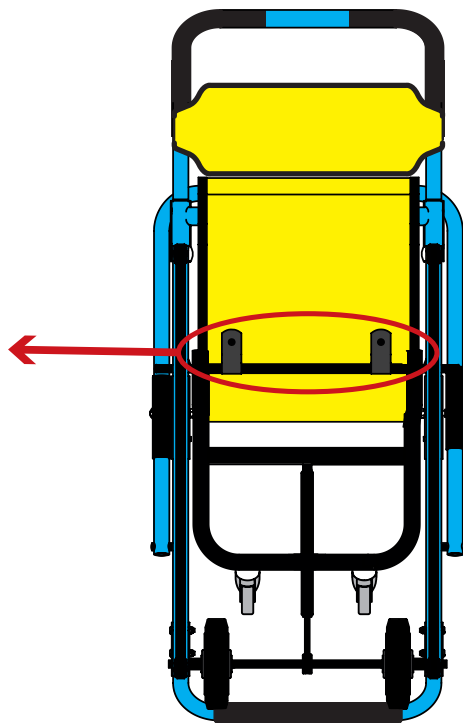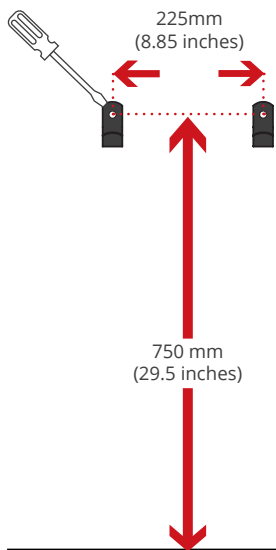

INSTALACJA



Evac+Chair, lub autoryzowany dystrybutor, może zainstalować twoje krzesło do ewakuacji, jak również zapewnić fachową poradę i wskazówki dotyczące najbardziej efektywnych miejsc w Twoim budynku.

OCENA WIZUALNA

ZALECAMY PRZEPROWADZANIE KWARTALNYCH KONTROLI W CELU ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI KRZESŁA.

PRZYGOTOWANIE/MAGAZYNOWANIE



- + Upewnij się, że miejsce montażu krzesła jest łatwo dostępne.
- + Sprawdź, czy w miejscu montażu nie znajdują się elementy mogące utrudnić wydostanie i rozłożenie krzesła.
- + Upewnij się, że koziółki rozkładają się i chowają prawidłowo

SPRAWDŹ KOŁA



- + Czy nie ma pęknięć koła lub piasty
- + Czy koła nie są zdeformowane
- + Czy hamulec działa poprawnie
- + Upewnij się, że koła obracają się swobodnie

SPRAWDŹ SIEDZISKO



- + Czy nie ma pęknięć wokół szwów
- + Czy nie ma zgrubień materiału
- + Sprawdź, czy klamra pasa działa prawidłowo

SPRAWDŹ ZAGŁÓWEK



- + Czy nie ma pęknięć wokół szwów
- + Czy nie ma zgrubień materiału
- + Upewnij się, że zagłówek może swobodnie przesuwać się wzdłuż uchwyty

SPRAWDŹ PASY



- + Czy nie ma głębokich pęknięć ani uszczerbień
- + Nie ma uszkodzeń materiału



Skontaktuj się **natychmiast** z firmą Evac+Chair lub autoryzowanym dystrybutorem, jeśli któraś z tych wad pojawi się na twoim krześle.

AKCESORIA

POWIADOMIENIE RECEPCYJNE



SIEDZENIE EWAKUACYJNE



ALARM PRZECIWKRADZIEŻOWY



NAKLADKA SIEDZISKO



SZAFKA NA KRZESŁO



UCHWYT WOLNOSTOJĄCY



POKROWIEC



MIĘDZYNARODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI



To view our user guide online please visit:



Als u onze gebruikershandleiding online wilt bekijken, gaat u naar:



Um unser Benutzerhandbuch online anzuzeigen, besuchen Sie bitte:



Pour consulter notre guide de l'utilisateur en ligne, veuillez visiter:



Per visualizzare la nostra guida utente online, visitare:



Para ver nuestra guía de usuario en línea, visite:



Para ver o nosso guia do usuário on-line, visite:



Aby wyświetlić naszą instrukcję obsługi online, odwiedź:



要在線查看我們的用戶指南，請訪問：



evacchair.co.uk/user-guides

EVAC+CHAIR®


Emergency Evacuation For Everyone



Dystrybucja w Polsce:
DOWAN Sp. z o.o. 80-266 Gdańsk Al.
Grunwaldzka 220/4

Tel: 603 612 043

www.dowan.com.pl

 Evac+Chair International Ltd, Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW UK

+44 (0)121 706 6744 | evacchair.co.uk | enquiries@evacchair.co.uk



1-519 (V5)

